

access

Una gamma di prodotti **economici**
per uno studio dentistico **più redditizio**

GO-TWO

Conicità costante

 **Rotazione** continua

Sequenza endodontica NiTi

- preparazione del canale
- ampliamento del corridoio di irrigazione
- detersione del canale

CASI STANDARD
E/O DIFFICILI



AVANTAGES

Efficacia:

- Ottima capacità di taglio
- Elevata conicità all'apice che consente una buona detersione del canale
- Facilitata risalita dei detriti
- Buona stabilità grazie alle lamelle multiple

Sicurezza degli strumenti:

- Punta smussa

Semplicità:

- Una sequenza base semplice per tutti i canali

Sterilizzabili a 134°C

Si adattano a tutti i motori e i contrangoli endodontici a rotazione continua.

GO-TWO

CARATTERISTICHE

Lunghezza 21 mm: parte lavorante 16 mm

Lunghezza 25 mm: parte lavorante 16 mm e 21 mm

Lunghezza 31 mm: parte lavorante 21 mm



LUNGHEZZA DELLA PARTE LAVORANTE : 16 mm					
CONICITÀ	ISO	VELOCITÀ	TORQUE	21 mm	25 mm
Assortiti	N°10-25	-	-	3137520	3137521
	N°25-40	-	-	3137522	3137523
4%	● N°10	250	1.2	3137525	3137526
	● N°35	250	1.2	3137527	3137528
	● N°40	250	2	3137529	3137530
5%	○ N°15	250	1.2	3137531	3137532
	● N°30	250	1.2	3137533	3137534
6%	● N°20	250	2	3137535	3137536
	● N°25	250	2	3137537	3137538
	● N°30	250	1.5	3137539	3137540
	● N°35	250	1.5	3137541	3137542
	● N°40	250	2	-	3137543
7%	● N°25	250	2	3137544	3137545

LUNGHEZZA DELLA PARTE LAVORANTE : 21 mm					
CONICITÀ	ISO	VELOCITÀ	TORQUE	25 mm	31 mm
Assortiti	N°10-25	-	-	3137524	-
4%	● N°10	250	1.2	3137546	3137547
	● N°35	250	1.2	-	3137548
	● N°40	250	2	-	3137549
5%	○ N°15	250	1.2	3137550	3137551
	● N°30	250	1.2	-	3137552
6%	● N°20	250	2	3137553	3137554
	● N°25	250	2	3137555	3137556
	● N°30	250	1.5	-	3137557
	● N°35	250	1.5	-	3137558
	● N°40	250	2	-	3137559

Confezione da 6 strumenti per referenza

PROTOCOLLO

SEQUENZA BASE

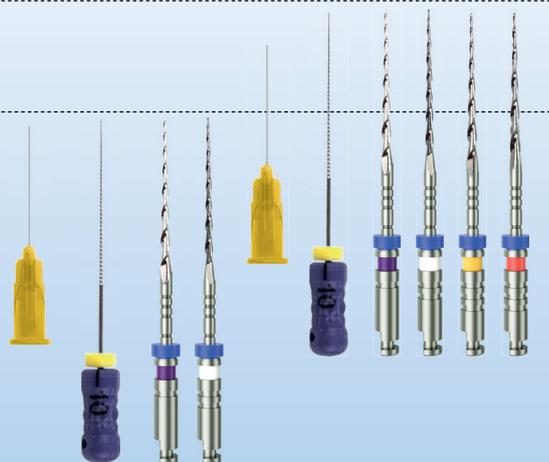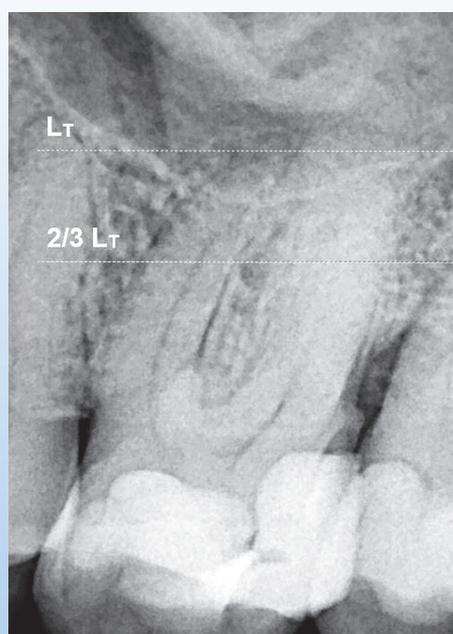

Sequenza base:

10/.04 - 15/.05 - 20/.06 - 25/.06

Allargamento dell'apice:

30/.05 - 35/.04 - 40/.04

Ritratamento:

15/.05 - 25/.06 - 25/.07