

access

Een gamma goedkope producten
voor een rendabelere tandartsenpraktijk

GO-TWO

Constance coniciteit



Constance **rotatie**

Endodontische NiTi-sequentie

- voorbereiding van het kanaal
- verbreding van het irrigatiekanaal
- schoonmaken van het kanaal

STANDAARD EN/OF
MOEILIJKE GEVALLEN



VOORDELEN

Doeltreffendheid:

- Uitstekend snijvermogen
- Sterke apicale coniciteit waardoor het kanaal goed kan worden schoongemaakt
- Verwijderen van afval wordt gemakkelijk
- Goede stabiliteit dankzij de meervoudige randen

Veiligheid van de instrumenten:

- Met punt uit mousse

Eenvoud:

- Basissequentie makkelijk voor alle kanalen

Steriliseerbaar op 134 °C

Geschikt voor continu roterende endodontische motoren en tegenhoeken

GO-TWO

KENMERKEN

Lengte 21 mm: werkzaam gedeelte 16 mm

Lengte 25 mm: werkzaam gedeelte 16 mm en 21 mm

Lengte 31 mm: werkzaam gedeelte 21 mm



LENGTE VAN EHT WERKZAME GEDEELTE: 16 mm					
CONICITEIT	ISO	SPEED	TORQUE	21 mm	25 mm
Afgestemd	N°10-25	-	-	3137520	3137521
	N°25-40	-	-	3137522	3137523
4%	● N°10	250	1.2	3137525	3137526
	● N°35	250	1.2	3137527	3137528
	● N°40	250	2	3137529	3137530
5%	○ N°15	250	1.2	3137531	3137532
	● N°30	250	1.2	3137533	3137534
6%	● N°20	250	2	3137535	3137536
	● N°25	250	2	3137537	3137538
	● N°30	250	1.5	3137539	3137540
	● N°35	250	1.5	3137541	3137542
	● N°40	250	2	-	3137543
7%	● N°25	250	2	3137544	3137545

LENGTE VAN EHT WERKZAME GEDEELTE: 21 mm					
CONICITEIT	ISO	SPEED	TORQUE	25 mm	31 mm
Afgestemd	N°10-25	-	-	3137524	-
4%	● N°10	250	1.2	3137546	3137547
	● N°35	250	1.2	-	3137548
	● N°40	250	2	-	3137549
5%	○ N°15	250	1.2	3137550	3137551
	● N°30	250	1.2	-	3137552
6%	● N°20	250	2	3137553	3137554
	● N°25	250	2	3137555	3137556
	● N°30	250	1.5	-	3137557
	● N°35	250	1.5	-	3137558
	● N°40	250	2	-	3137559

Doos van 6 instrumenten per referentie

PROTOCOL

BASISSEQUENTIE

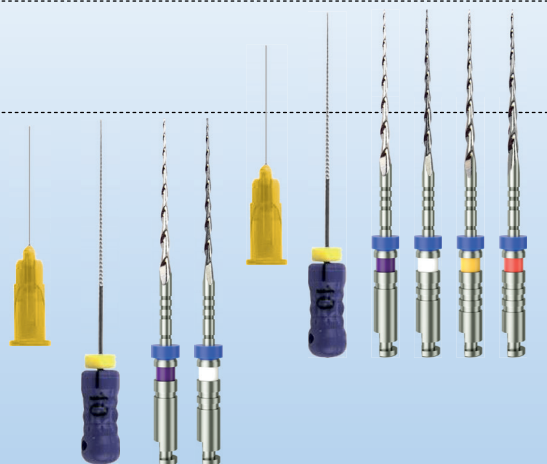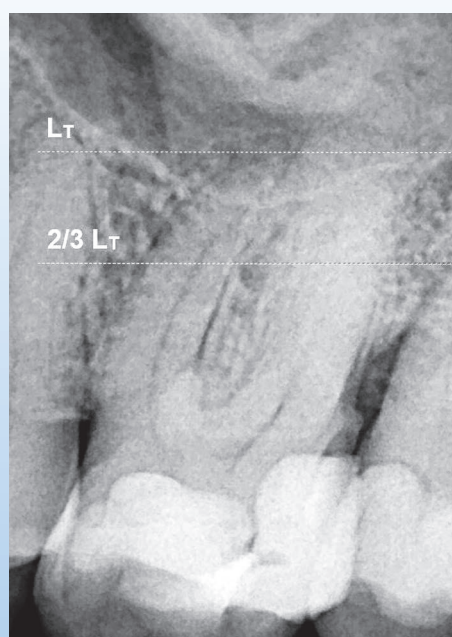

Basissequentie:

10/.04 - 15/.05 - 20/.06 - 25/.06

Apicale verbreding:

30/.05 - 35/.04 - 40/.04

Verwijdering:

15/.05 - 25/.06 - 25/.07