

access

STERILE R

GO-TWO

Rotación continua



250 rpm


Conicidad constante

CASOS ESTÁNDAR
Y/O DIFÍCILES


Aleación NiTi

para una memoria de forma controlada que evita la creación de escalones y perforaciones


Prueba GO-TWO

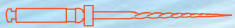


¡Optimice EL ASCENSO DE LOS RESIDUOS!

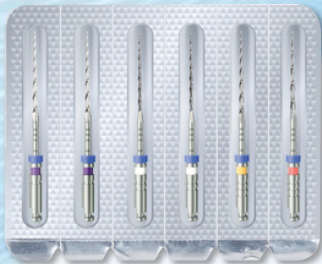

PROTOCOLO

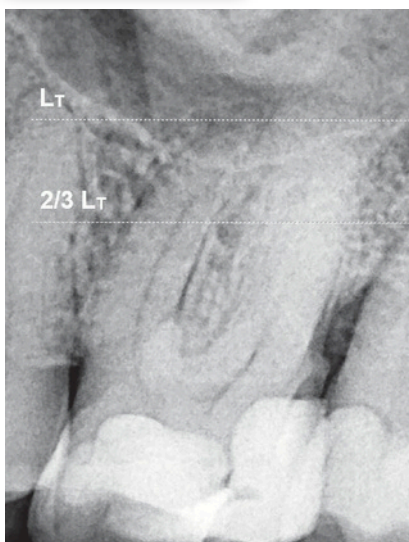

SECUENCIA BÁSICA

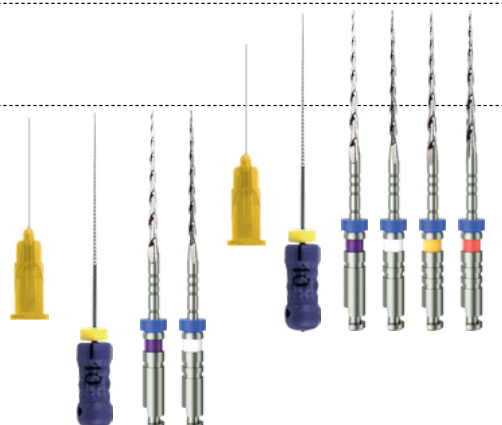

Secuencia básica:

10/.04 - 15/.05 - 20/.06 - 25/.06

Ensanchamiento apical:

30/.05 - 35/.04 - 40/.04


Retratamiento:

15/.05 - 25/.06 - 25/.07

GO-TWO

CARACTERÍSTICAS


Longitud 21 mm: parte activa 16 mm
Longitud 25 mm: parte activa 16 mm y 21 mm
Longitud 31 mm: parte activa 21 mm

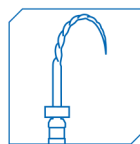

Flexibilidad



Potencia de corte

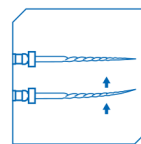

Resistencia



Uso único

x6

LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA: 16 mm					
CONICIDAD	ISO	SPEED	TORQUE	21 mm	25 mm
Surtido	N°10-25	-	-	3166668	3166669
	N°25-40	-	-	3166670	3166671
4%	N°10	250	12.	3166673	3166674
	N°35	250	12.	3166675	3166676
	N°40	250	2	3166666	3166677
5%	N°15	250	12.	3166678	3166679
	N°30	250	12.	3166680	3166681
6%	N°20	250	2	3166682	3166683
	N°25	250	2	3166684	3166685
	N°30	250	1.5	3166667	3166686
	N°35	250	1.5	3166687	3166688
7%	N°40	250	2	-	3166689
	N°25	250	2	3166690	3166691

LONGITUD DE LA PARTE ACTIVA: 21 mm					
CONICIDAD	ISO	SPEED	TORQUE	25 mm	31 mm
Surtido	N°10-25	-	-	3166672	-
4%	N°10	250	12.	3166692	3166693
	N°35	250	12.	-	3166694
	N°40	250	2	-	3166695
5%	N°15	250	12.	3166696	3166697
	N°30	250	12.	-	3166698
6%	N°20	250	2	3166699	3166700
	N°25	250	2	3166701	3166702
	N°30	250	1.5	-	3166703
	N°35	250	1.5	-	3166704
	N°40	250	2	-	3166705

access

UNA GAMA COMPLETA DE LIMAS ESTÉRILES

		CANALES ESTÁNDAR RECTOS/ANCHOS	CANALES DIFÍCILES FINOS/CURVADOS
Permeabilización de los conductos			
	PREFILE		✓
	GO-GLIDER		✓
	EASY-FILE FLEX <i>Glider flexibilidad +++</i>		✓
Preparación			
	GO-TAPER FLEX <i>flexibilidad +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER BLUE <i>flexibilidad +++</i>	✓	✓
	GO-TAPER X	✓	✓
	GO-TWO	✓	✓
	GO-TAPER UNIVERSAL	✓	
	REVERSO BLUE <i>flexibilidad +++</i>	✓	✓
	EASY-FILE FLEX <i>flexibilidad +++</i>	✓	✓
Retratamiento			
	GO-TAPER RETREATMENT	✓	
	REVERSO SILVER	✓	