

# access

STERILE R

## GO-TWO

### Rotação contínua



250 rpm


Liga NiTi

para uma memória controlada que evita a criação de degraus e perfurações

Experimente GO-TWO



Otimize A RECOLHA DE DETRITOS!

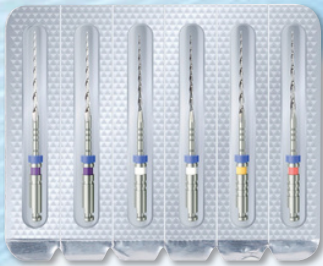


Conicidade constante


CAS PADRÕES  
E/OU DIFÍCEIS



PROTOCOLE

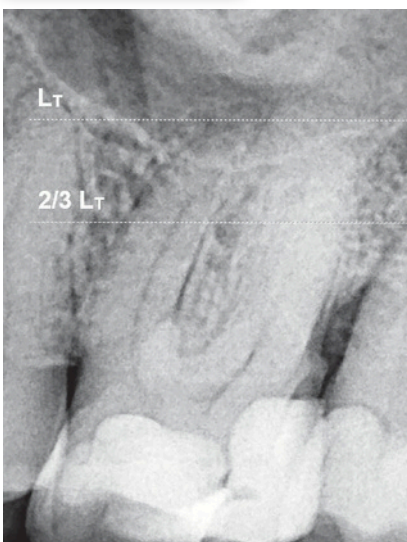

SEQUÊNCIA BÁSICA

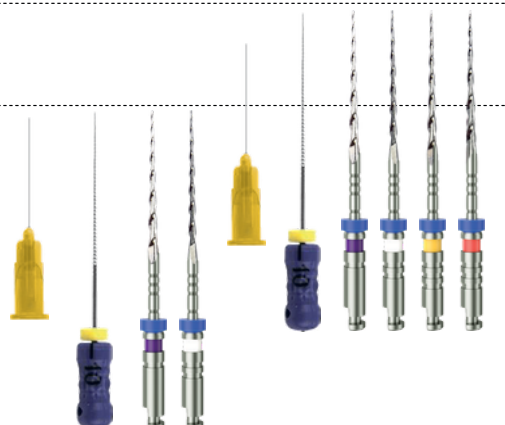

Sequência básica:  
10/.04 - 15/.05 - 20/.06 -  
25/.06


Alargamento apical:  
30/.05 - 35/.04 - 40/.04

Retratamento:  
15/.05 - 25/.06 - 25/.07

# GO-TWO

## CARACTERÍSTICAS


Comprimento 21 mm: parte útil 16 mm Comprimento 25 mm: parte útil 16 mm e 21 mm Comprimento 31 mm: parte útil 21 mm

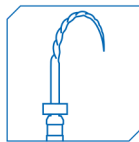

Flexibilidade



Capacidade de corte

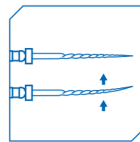

Resistência



Uso único

x6

| COMPRIMENTO DA PARTE TRABALHANTE: 16 mm |         |       |        |         |         |
|-----------------------------------------|---------|-------|--------|---------|---------|
| CONICIDADE                              | ISO     | SPEED | TORQUE | 21 mm   | 25 mm   |
| Combinadas                              | N°10-25 | -     | -      | 3166668 | 3166669 |
|                                         | N°25-40 | -     | -      | 3166670 | 3166671 |
| 4%                                      | N°10    | 250   | 12.    | 3166673 | 3166674 |
|                                         | N°35    | 250   | 12.    | 3166675 | 3166676 |
|                                         | N°40    | 250   | 2      | 3166666 | 3166677 |
| 5%                                      | N°15    | 250   | 12.    | 3166678 | 3166679 |
|                                         | N°30    | 250   | 12.    | 3166680 | 3166681 |
| 6%                                      | N°20    | 250   | 2      | 3166682 | 3166683 |
|                                         | N°25    | 250   | 2      | 3166684 | 3166685 |
|                                         | N°30    | 250   | 1.5    | 3166667 | 3166686 |
|                                         | N°35    | 250   | 1.5    | 3166687 | 3166688 |
| 7%                                      | N°40    | 250   | 2      | -       | 3166689 |
|                                         | N°25    | 250   | 2      | 3166690 | 3166691 |

| COMPRIMENTO DA PARTE TRABALHANTE: 21 mm |         |       |        |         |         |
|-----------------------------------------|---------|-------|--------|---------|---------|
| CONICIDADE                              | ISO     | SPEED | TORQUE | 25 mm   | 31 mm   |
| Combinadas                              | N°10-25 | -     | -      | 3166672 | -       |
| 4%                                      | N°10    | 250   | 12.    | 3166692 | 3166693 |
|                                         | N°35    | 250   | 12.    | -       | 3166694 |
|                                         | N°40    | 250   | 2      | -       | 3166695 |
| 5%                                      | N°15    | 250   | 12.    | 3166696 | 3166697 |
|                                         | N°30    | 250   | 12.    | -       | 3166698 |
| 6%                                      | N°20    | 250   | 2      | 3166699 | 3166700 |
|                                         | N°25    | 250   | 2      | 3166701 | 3166702 |
|                                         | N°30    | 250   | 1.5    | -       | 3166703 |
|                                         | N°35    | 250   | 1.5    | -       | 3166704 |
|                                         | N°40    | 250   | 2      | -       | 3166705 |

access

UMA GAMA COMPLETA DE LIMAS ESTERILIZADAS

|                  |                                                | CANALIZAÇÕES PADRÃO<br>RETAS/LARGAS | CANALIZAÇÕES DIFÍCEIS<br>FINAS/CURVAS |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Pré-alargamento  |                                                |                                     |                                       |
|                  | PREFILE                                        |                                     | ✓                                     |
|                  | GO-GLIDER                                      |                                     | ✓                                     |
|                  | EASY-FILE FLEX <i>Glider flexibilidade +++</i> |                                     | ✓                                     |
| Tratamento       |                                                |                                     |                                       |
|                  | GO-TAPER FLEX <i>flexibilidade +++</i>         | ✓                                   | ✓                                     |
|                  | GO-TAPER BLUE <i>flexibilidade +++</i>         | ✓                                   | ✓                                     |
|                  | GO-TAPER X                                     | ✓                                   | ✓                                     |
|                  | GO-TWO                                         | ✓                                   | ✓                                     |
|                  | GO-TAPER UNIVERSAL                             | ✓                                   |                                       |
|                  | REVERSO BLUE <i>flexibilidade +++</i>          | ✓                                   | ✓                                     |
|                  | EASY-FILE FLEX <i>flexibilidade +++</i>        | ✓                                   | ✓                                     |
| Reaproveitamento |                                                |                                     |                                       |
|                  | GO-TAPER RETREATMENT                           | ✓                                   |                                       |
|                  | REVERSO SILVER                                 | ✓                                   |                                       |