

## Protocolo GO-TAPER RETREATMENT (retratamiento)



Después de abrir la cámara pulpar y localizar todos los canales, llene la cavidad de acceso con hipoclorito de sodio.



Utilice el instrumento C1 en contacto con la gutapercha con una ligera presión apical. Deje que baje unos pocos mm y alise las paredes del canal de nuevo.



Entonces tome el instrumento C2 y lo baja en el canal, todavía en contacto con la gutapercha y con una ligera presión apical.



Luego realice el mismo movimiento con la herramienta C3.



Enjuague abundantemente.



Repita la secuencia comenzando con el instrumento C2. El instrumento C1 no se utilizará en este momento. Avanzar apicalmente en el canal.



Avance un poco más apicalmente con el instrumento C3 y repita los pasos de enjuague - C2 - C3 hasta la longitud de trabajo.