

Protocole GO-TAPER RETREATMENT (en retraitement)



Après avoir ouvert la chambre et localisé tous les canaux, remplissez la cavité d'accès d'hypochlorite de sodium.



Utilisez l'instrument C1 au contact de la gutta avec une légère pression apicale. Laissez-le descendre de quelques mm et remontez en brossant les parois canalaire



Prenez ensuite l'instrument C2, et descendant dans le canal, toujours au contact de la gutta et avec une légère pression apicale.



Faites ensuite le même mouvement avec l'instrument C3



Rincez abondamment.



Recommencez la séquence en commençant par l'instrument C2. L'instrument C1 ne sera plus utilisé à ce stade. Avancer apicalement dans le canal.



Avancez encore un peu plus en apical avec l'instrument C3 et recommencez les étapes de rinçages - C2 - C3 jusqu'à la longueur de travail.