

Protocol GO-TAPER RETREATMENT (herverwerking)



Na de opening van de pulpakamer en de lokalisatie van alle wortelkanalen, vult u de toegangsholte met natriumhypochloriet.



Gebruik instrument C1 bij contact met de guttapercha met een lichte apicale druk. Laat het een paar mm naar beneden gaan en in een borstelbeweging weer omhoog langs de kanaalwanden.



Neem vervolgens instrument C2 en ga dieper in het wortelkanaal, behoud het contact met de guttapercha, met een lichte apicale druk.



Maak vervolgens dezelfde beweging met het instrument C3.



Overvloedig spoelen.



Herbegin in volgorde en begin met instrument C2. Vanaf nu wordt instrument C1 niet langer gebruikt. Ga apicaal het wortelkanaal in.



Beweeg apicaal nog iets verder met instrument C3 en herbegin de stappen om te spoelen - C2 - C3 tot de werklengte wordt bereikt.