




Protocol GO-TAPER X (behandeling)

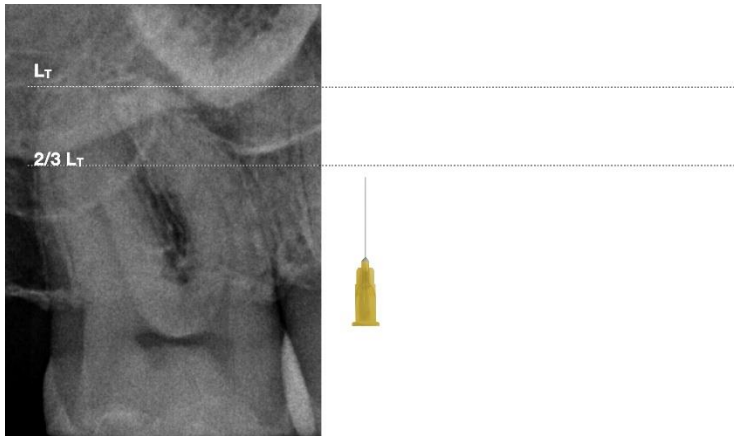


Na de opening van de pulpakamer en de lokalisatie van alle wortelkanalen, vult u de toegangsholte met natriumhypochloriet.

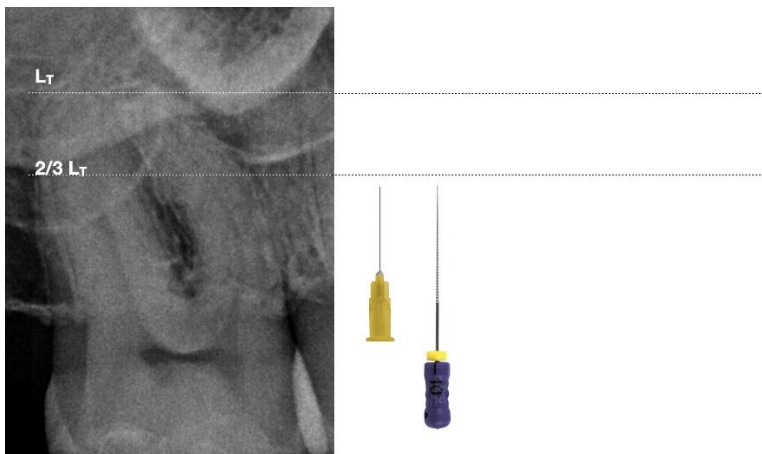


Neem een K10-vijl en beng deze passief in het wortelkanaal in, met 1/8e links-rechtsbewegingen. Ga verder zonder druk uit te oefenen en stop wanneer de vijl niet langer vooruitkomt. Noteer deze lengte.

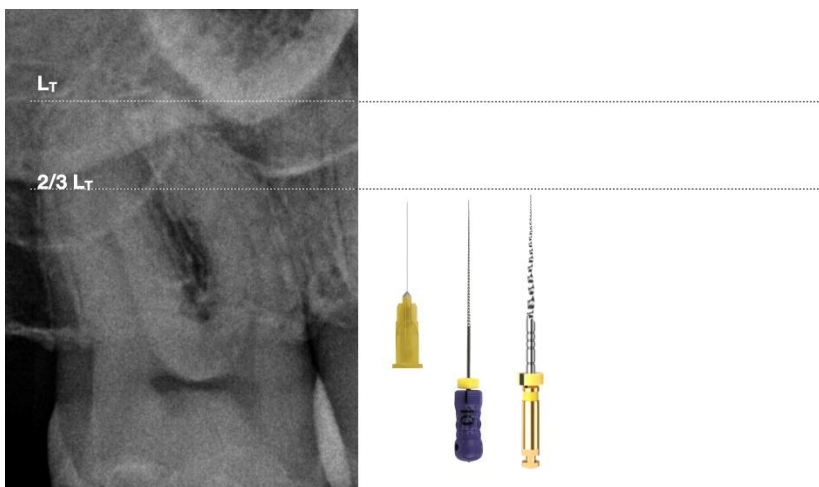


Neem instrument X1 (geel ring) uit de serie GO-TAPER X en bereidt het wortelkanaal voor op deze lengte. Breng hiervoor het instrument in het wortelkanaal in en ga verder zonder druk uit te oefenen. Herhaal deze pompbeweging gedurende 10 seconden, verwijder het instrument uit het wortelkanaal en reinig de spiralen van het instrument. Herhaal dit tot u de gewenste lengte bereikt. Zo hebt u de 2/3 van de pulpa van het wortelkanaal voorbereid.

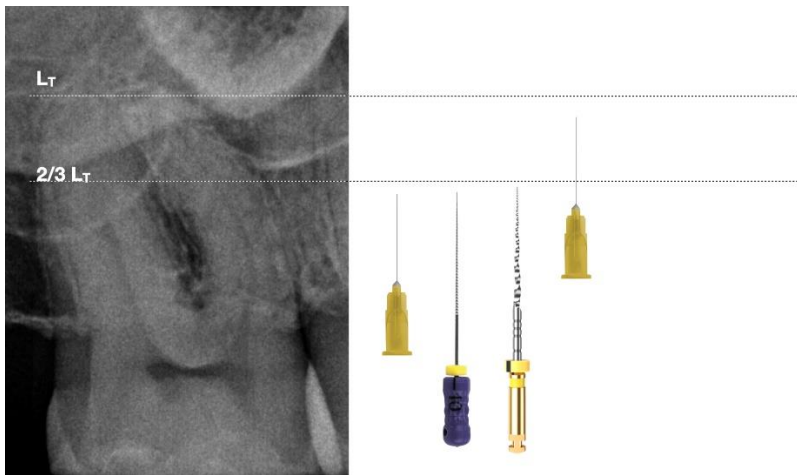


Overvloedig bevochtigen.

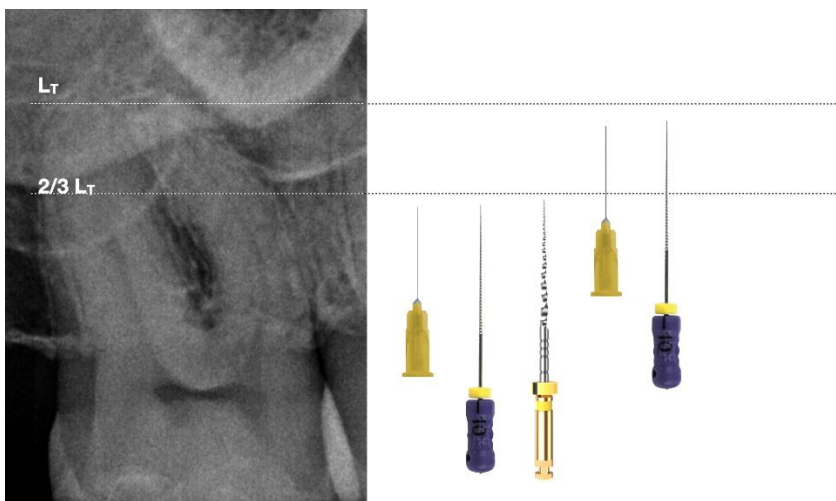

Neem opnieuw de K10-vijl en ga steeds passief verder. In de overgrote meerderheid van de gevallen geraakt de vijl tot aan de werk lengte. Meet deze lengte met een apex-locator. Indien u op dit punt verder geraakt in het wortelkanaal zonder de werk lengte te bereiken, oefen dan geen druk uit. Neem vijl 10 en bereid het gedeelte van het wortelkanaal dat u met uw instrument X1 hebt bereikt, en herhaal deze stap.

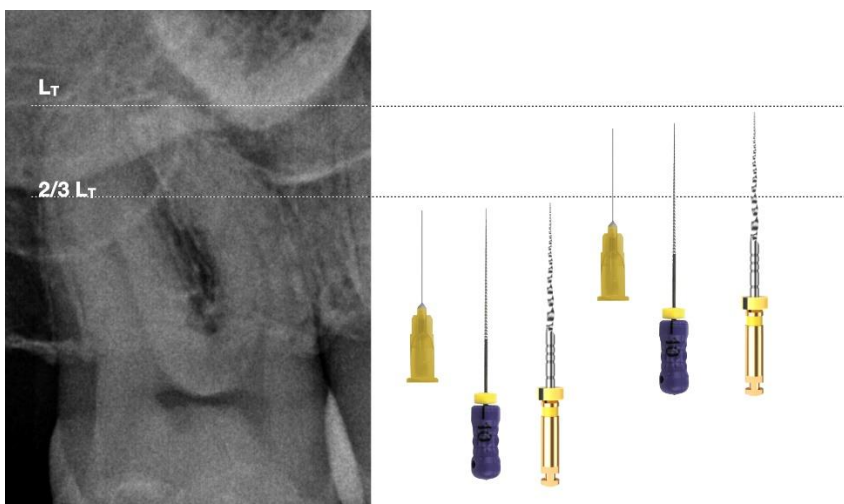

Bereid het wortelkanaal voor op de werk lengte met instrument X1 met eenzelfde beweging als voorheen.

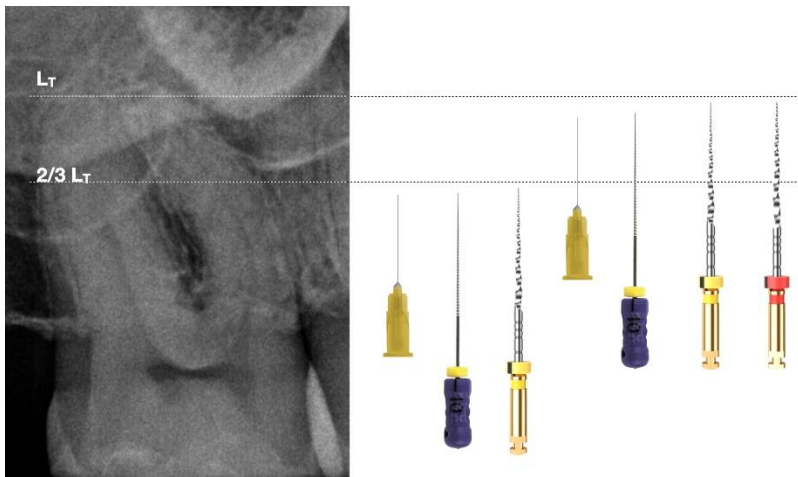

Doe daarna hetzelfde met instrument X2 (rood ring).
De mechanische voorbereiding van de tand is daarmee afgerond.