




Protocollo GO-TWO

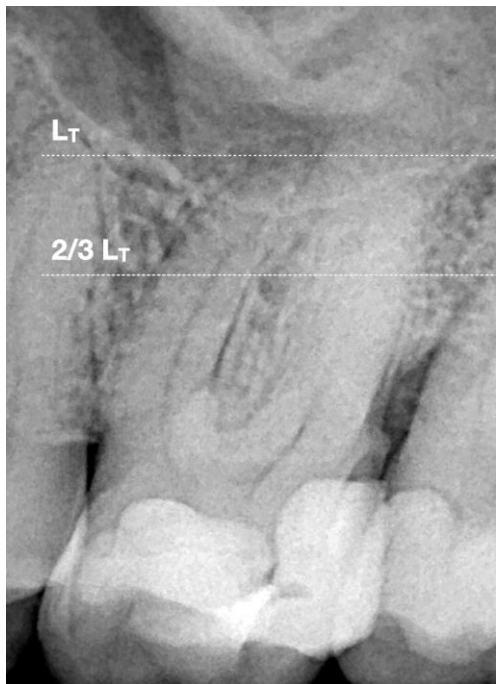


Dopo aver aperto la camera pulpare e aver localizzato tutti i canali, riempite la cavità d'accesso di ipoclorito di sodio.

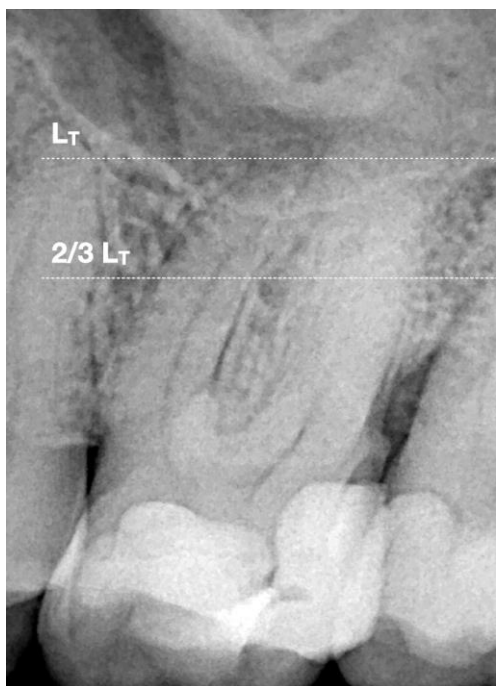


Prendete un K-file manuale 10 ed inseritelo passivamente nel canale con un movimento di $1/8$ di giro da sinistra a destra. Procedete senza esercitare pressione e fermatevi quando il file non avanza ulteriormente. Riportate questa lunghezza.

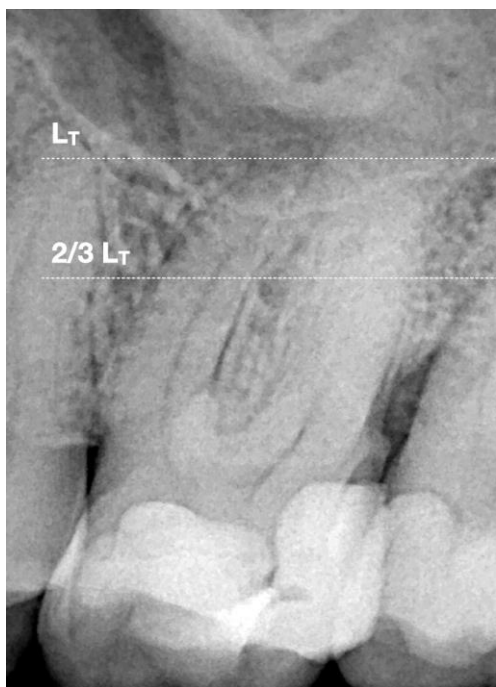

Prendete il primo strumento della sequenza (GO-TWO anello viola) e preparate il canale alla lunghezza raggiunta dal file manuale. Per fare ciò, inserite lo strumento in movimento nel canale e avanzate passivamente in direzione apicale. Fate risalire lo strumento aderendo alle pareti canalari. Estratelo dal canale e pulite le spire. Ripetete questa procedura fino ad arrivare alla lunghezza selezionata. Eseguite la stessa metodica con il secondo strumento della sequenza (GO-TWO anello bianco). In questo modo avrete preparato i 2/3 coronali del canale.

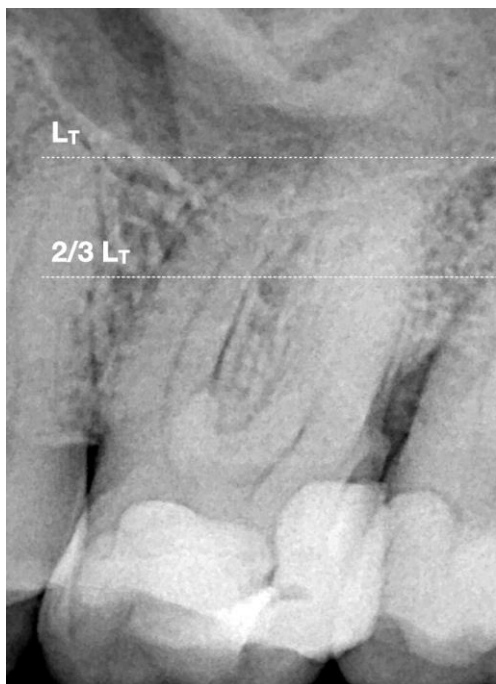


Irrigate abbondantemente.

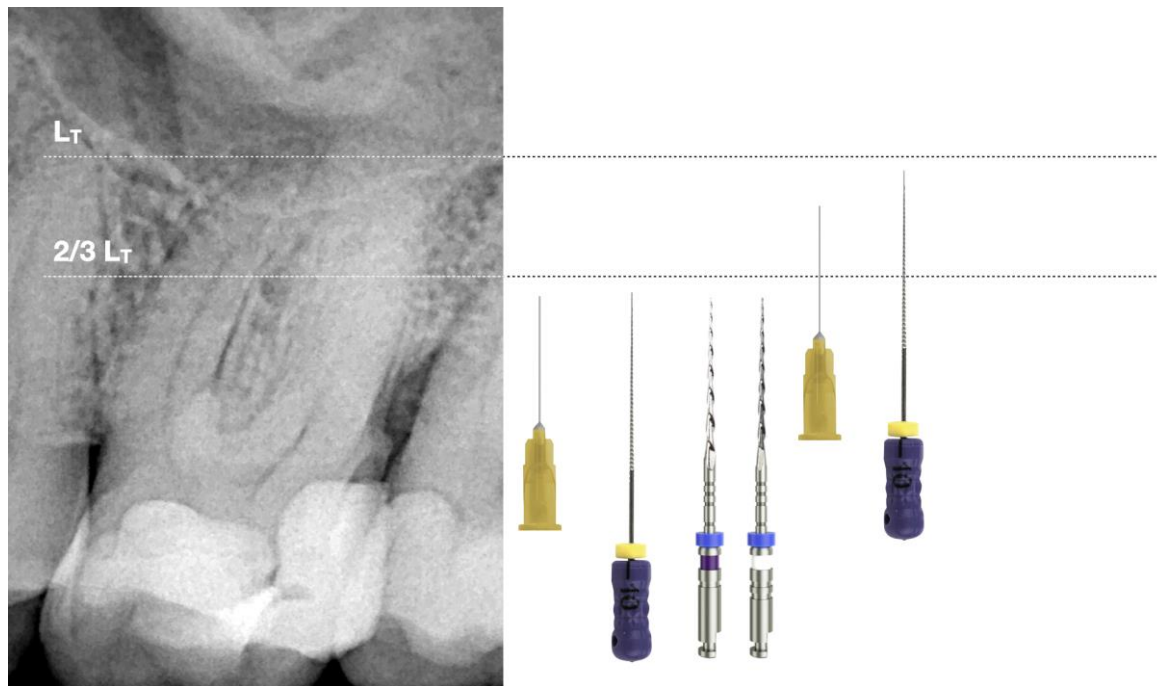

Riprendete il K-file manuale 10 e fatelo avanzare sempre passivamente. Nella maggiorparte dei casi il file arriva passivamente alla lunghezza di lavoro. Misurate quest'ultima con un rilevatore d'apice.

Se a questo stadio della preparazione non riuscite ad arrivare alla lunghezza di lavoro, non forzate. Estraiete il file 10 e preparate la porzione di canale che avete sondato con il GO-TWO anello viola e successivamente con quello anello bianco e ripetete questa fase.

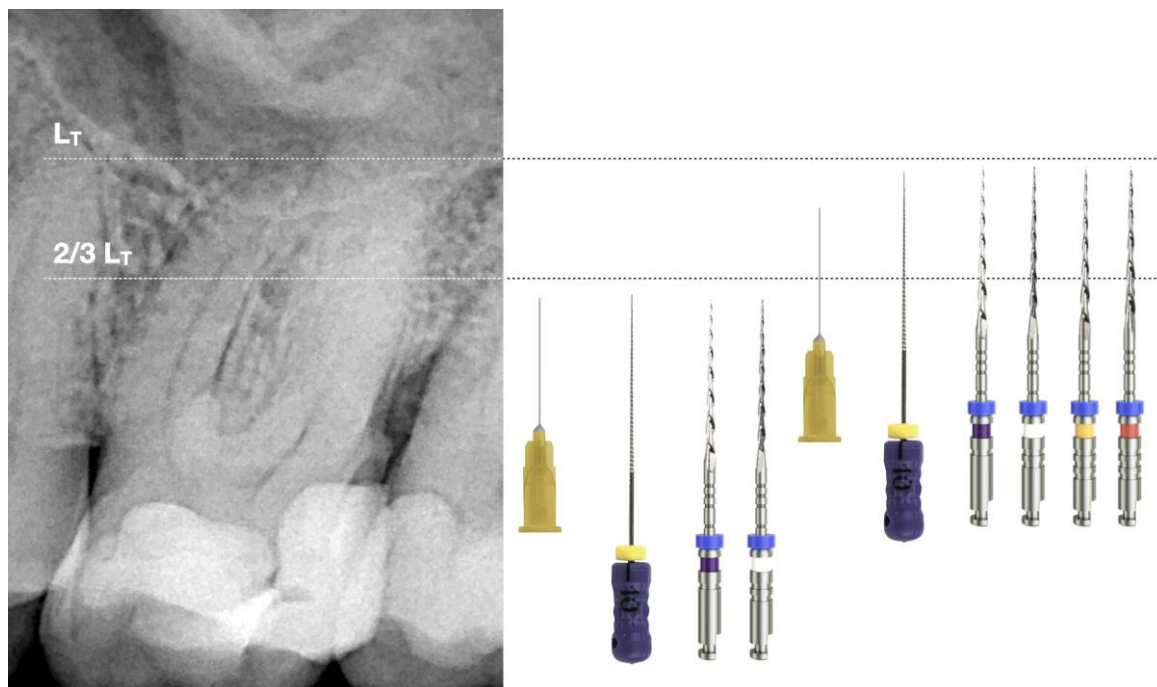

Preparate il canale alla lunghezza di lavoro utilizzando l'intera sequenza. Iniziate dal GO-TWO viola, poi il bianco, il giallo ed infine il rosso. Irrigate abbondantemente tra uno strumento e l'altro. La preparazione meccanica del dente è così completata.