



**Protocole EASY-FILE FLEX GLIDER**


**Avec EASY-FILE FLEX :**

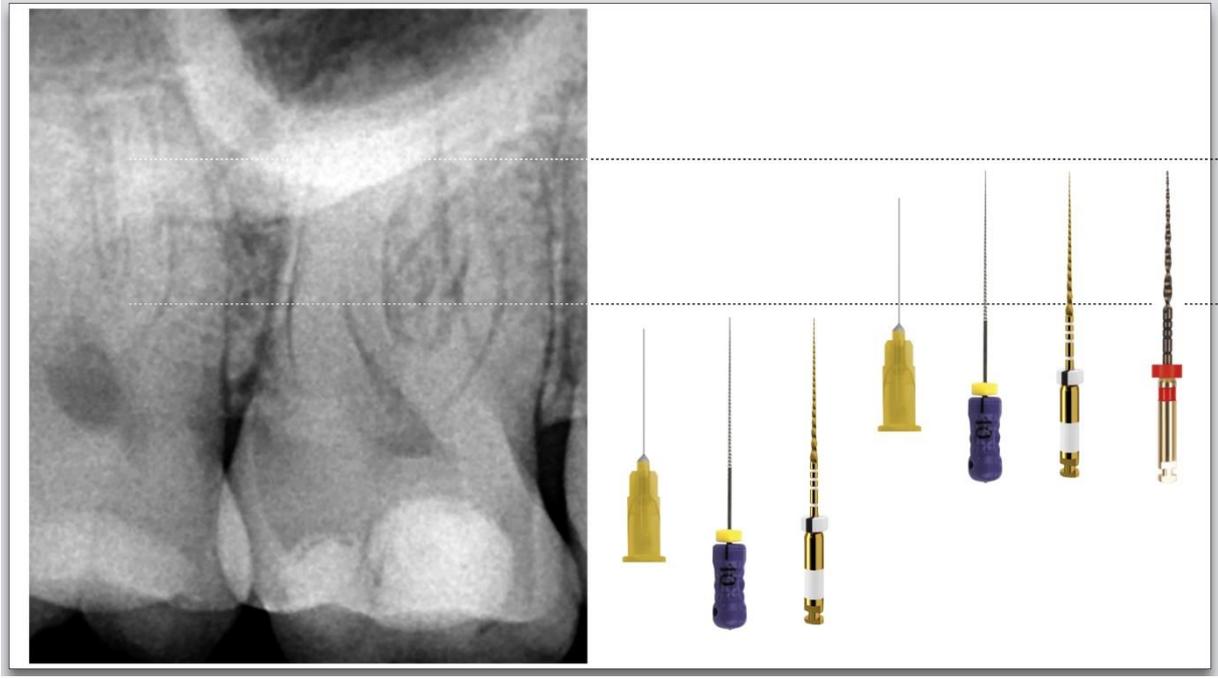

**Avec REVERSO BLUE :**

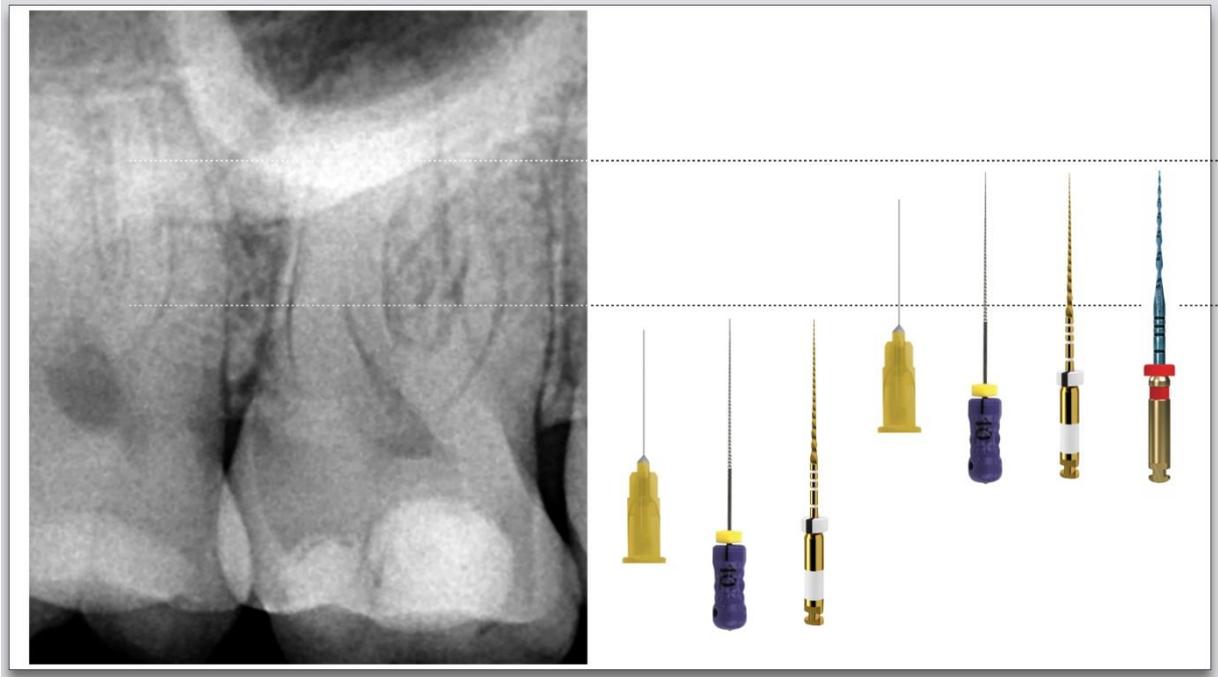

**Avec REVERSO SILVER :**

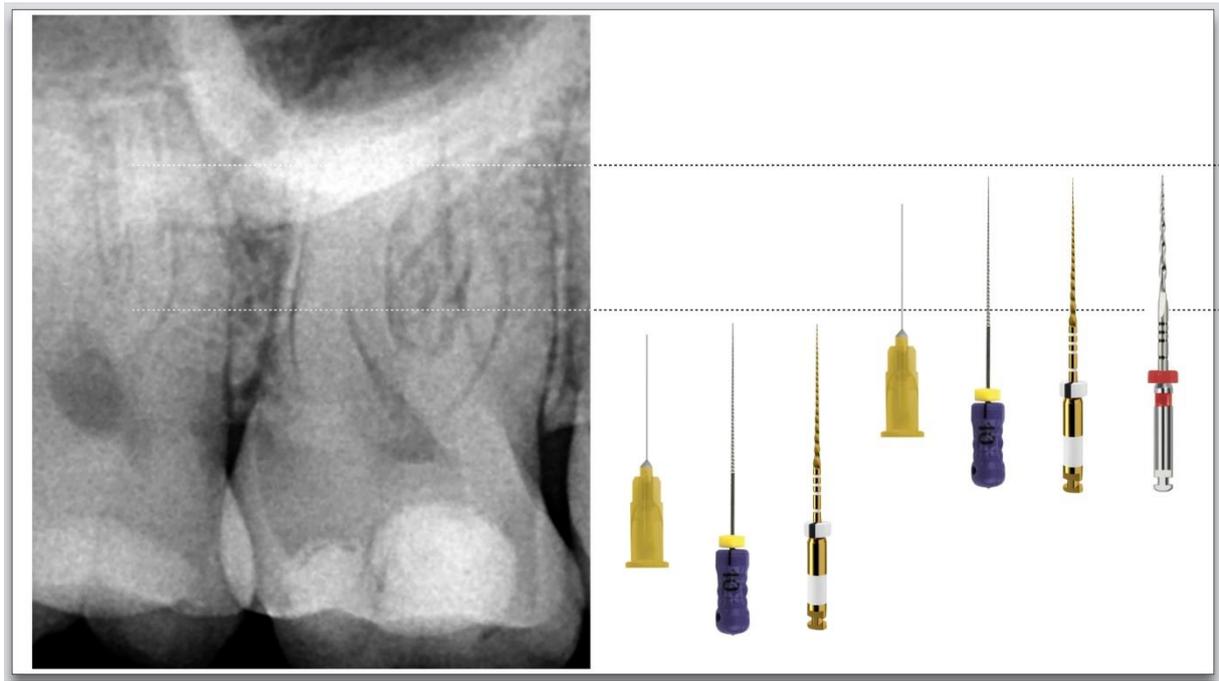

Après avoir ouvert la dent, remplir toute la chambre pulpaire d'une solution d'hypochlorite de sodium. Pénétrez dans les canaux à l'aide d'une lime 10 jusqu'à sentir une résistance. Mesurez cette longueur et préparez le canal à cette longueur à l'aide du pré-élargisseur **EASY-FILE FLEX GLIDER**. Rincez abondamment avec de l'hypochlorite de sodium.

Reprenez la lime 10 et avancez dans le canal jusqu'à la longueur de travail. Mesurez la longueur et préparez le canal à cette longueur à l'aide du pré-élargisseur **EASY-FILE FLEX GLIDER**. Rincez et finissez la préparation canalaire en amenant un **EASY-FILE FLEX** ou **REVERSO BLUE** ou un **REVERSO SILVER** à la longueur de travail.