



Protocollo PREFILE


Con EASY-FILE FLEX:

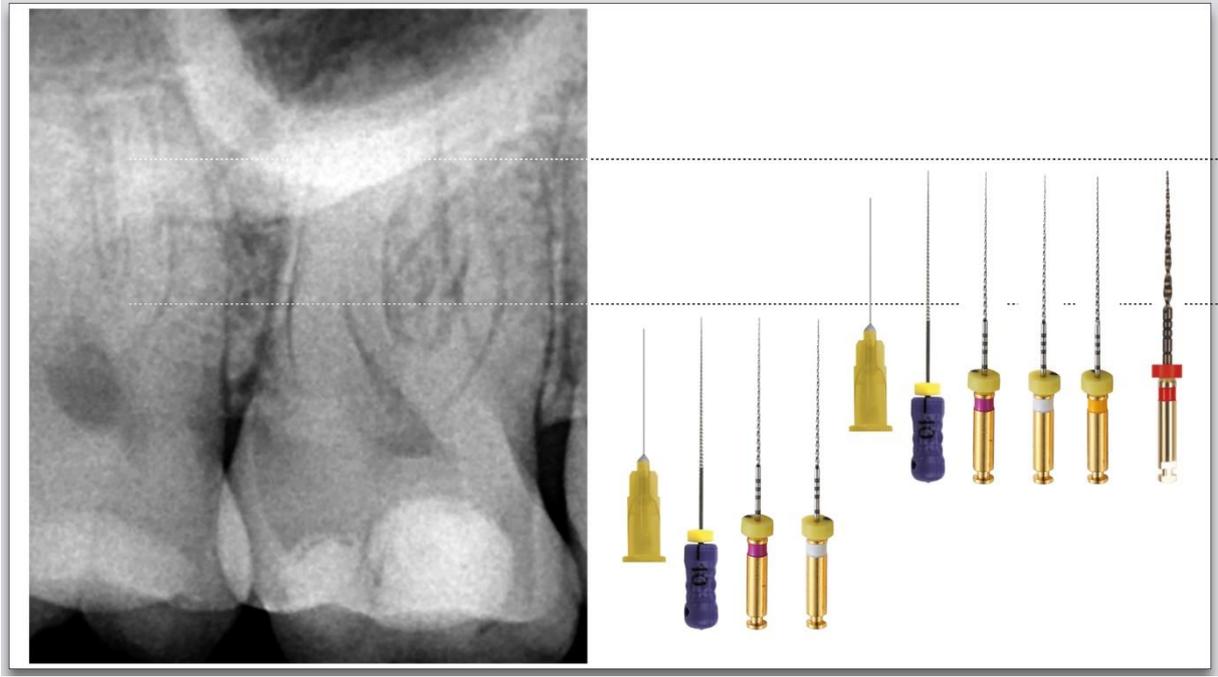


Con REVERSO BLUE:

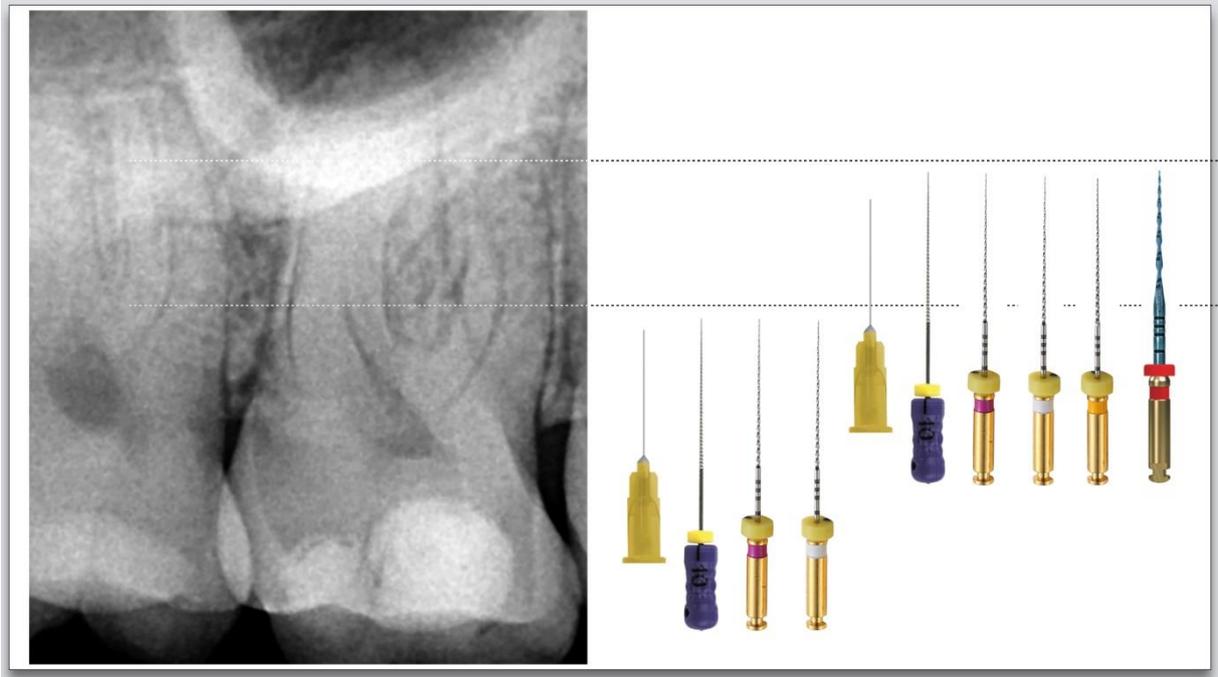


Con REVERSO SILVER:

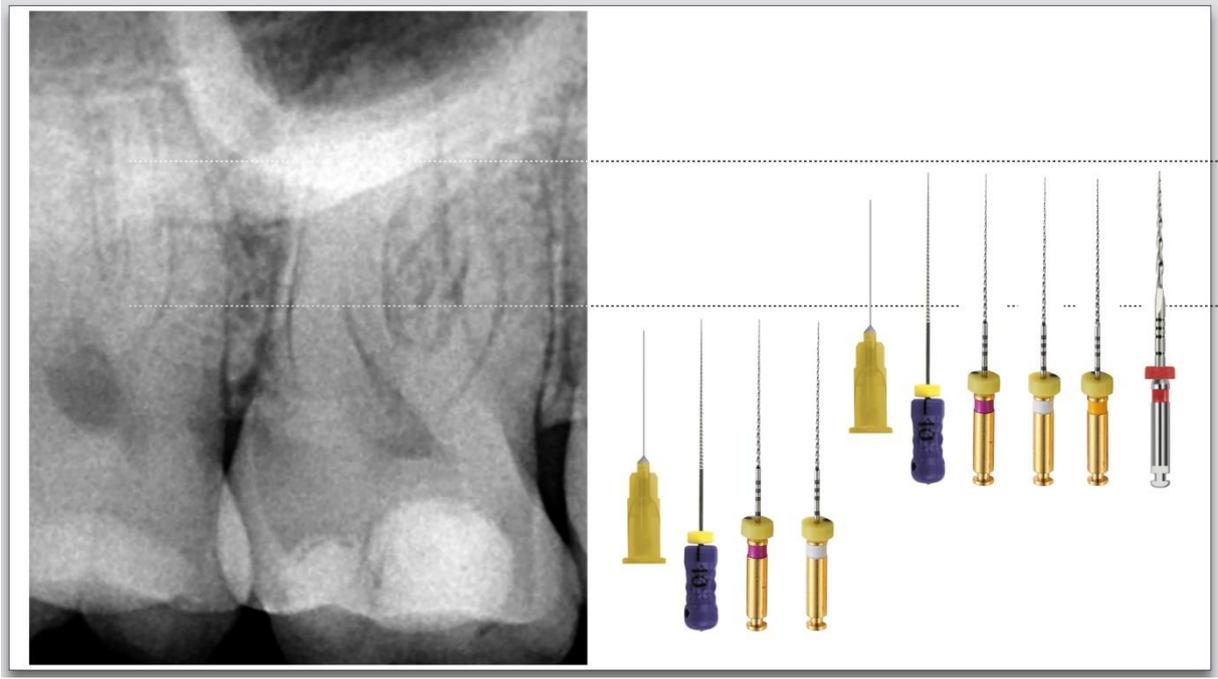

Con GO-TAPER FLEX:

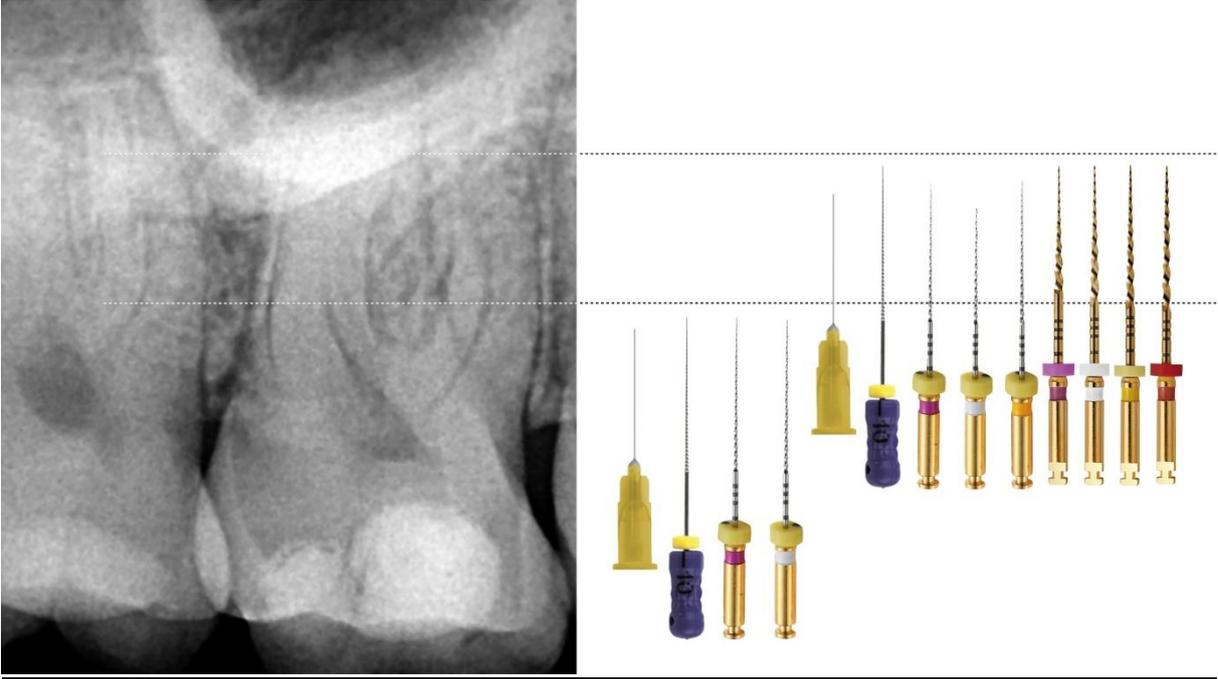

Con GO-TAPER UNIVERSAL:

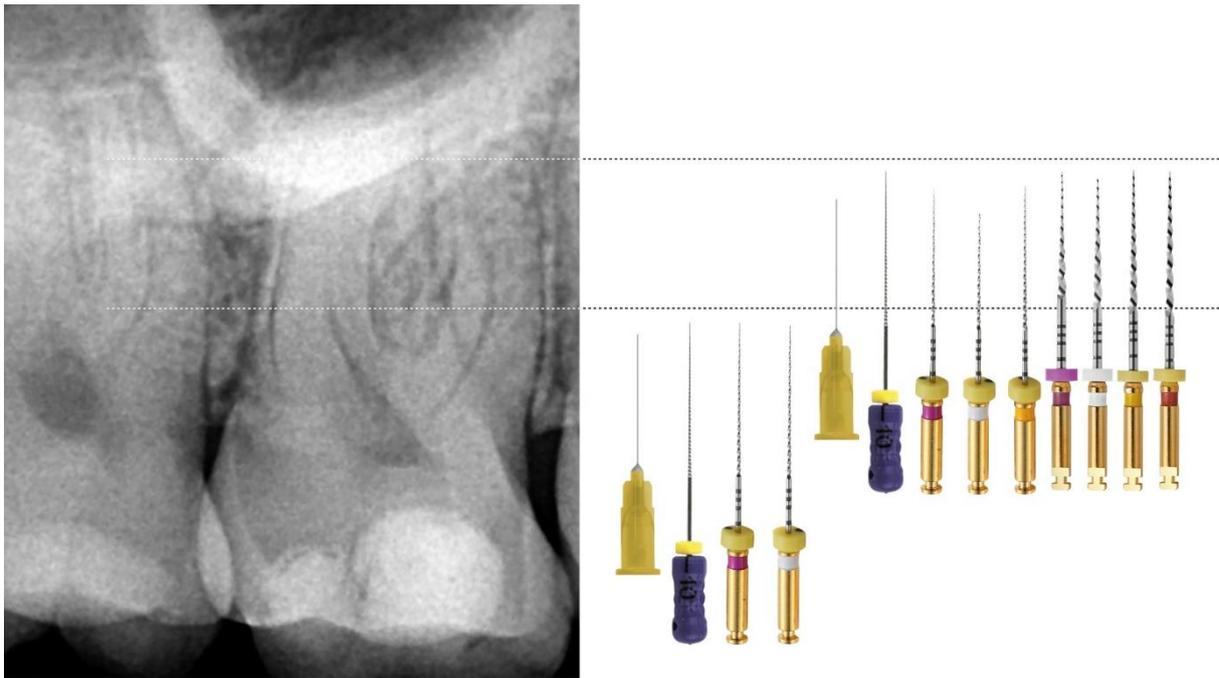

Después de la apertura del diente, rellene toda la cámara pulpar con solución de hipoclorito de sodio. Penetre en los canales con una lima de numero 10 hasta que perciba resistencia. Mida esa longitud y prepare el canal a esta longitud utilizando el **PREFILE**. Aclare abundantemente con hipoclorito de sodio. Utilice la lima 10 y muévala en el canal hasta la longitud de trabajo. Mida la longitud y prepare el canal a esta longitud utilizando el **PREFILE**. Enjuague y termine la preparación del canal radicular introduciendo una lima **EASY-FILE FLEX** o **REVERSO BLUE** o **REVERSO SILVER** o **GO-TAPER FLEX** o **GO-TAPER UNIVERSAL** a la longitud de trabajo.